

Sauerstofftherapiesysteme

Geräte & Zubehör für die Langzeitsauerstofftherapie

Ausgabe 12
- Februar 2022 -

We care



VIVISOL
Home Care Services



Inhalt

Seite	2	Sauerstofftherapie
Seite	3 - 6	Flüssigsauerstoffsystem VIVILOX
Seite	7	Diagnostik - Pulsoximeter
Seite	8 - 10	Sauerstoffkonzentratoren VIVIKONZ
Seite	11 - 12	Online Bestellportal & Zubehör & Verbrauchsmaterial
Seite	13	VIVISOL Service
Seite	14	VIVItavel Reiseservice
Seite	15 - 16	Sicherheitshinweise
Seite	17	Sauerstofftankstellen
Seite	18	Kontakt

Sauerstofftherapie

Basisinformationen

Ohne Sauerstoff kann der Mensch nicht leben

Jede Zelle im Körper benötigt dauernd Sauerstoff. Aber auch eine Sauerstoffarmut - welche im Moment keine spürbaren Auswirkungen hat - ist auf Dauer gefährlich und kann schließlich zum Herzversagen führen.

Es gibt viele verschiedene Erkrankungen, die die Atemwege betreffen und eine Atemnot auslösen oder eine starke Verringerung des Sauerstoffs im Blut (Hypoxämie) und im Gewebe (Hypoxie) verursachen können. Dieser Sauerstoffmangel kann in schweren Fällen auch chronisch sein.

An erster Stelle dieser Krankheiten steht die Chronisch Obstruktive Atemwegserkrankung (COPD), eine Form der chronischen Bronchitis, die besonders häufig bei Rauchern und bei Bewohnern von Gegenden mit hoher Luftverschmutzung auftritt.

Langzeitsauerstofftherapie - LTOT

Darunter versteht man die kontinuierliche Zufuhr von Sauerstoff über mehr als 16 Stunden pro Tag in ausreichender Menge (Floweinstellung), um den Sauerstoffpartialdruck (Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut) in Richtung Normwert anzuheben. Im Laufe der Jahre haben zahlreiche Studien die positiven Effekte der Langzeitsauerstofftherapie belegt, so dass ihre Effektivität unbestritten ist.

Die Langzeitsauerstofftherapie ist heute eine allgemein anerkannte und akzeptierte Behandlungsform bei chronischen Atemwegserkrankungen und wird als Goldstandard zur Behandlung nach ärztlicher Verordnung von COPD angesehen.

Wirkung / Nebenwirkung

Was kann LTOT bewirken?


- Anstieg der Sauerstoffkonzentration in den Lungenbläschen
- Erweiterung der Lungengefäße
- Drucksenkung im Lungenkreislauf
- Entlastung der rechten Herzhälfte
- Erhöhung des Sauerstoffgehaltes im Blut
- Verbesserung der Gewebeversorgung mit Sauerstoff
- Steigerung der Pumpfunktion des Herzens
- Die Anzahl der vermehrten roten Blutkörperchen nimmt ab, Fließeigenschaften des Blutes werden günstiger

Nebenwirkungen

Im Prinzip ist eine Langzeitsauerstofftherapie, auch bei langjähriger Anwendung, von Nebenwirkungen frei. Voraussetzung für eine Langzeitsauerstofftherapie ohne Nebenwirkungen ist eine strikte Einhaltung der, vom Arzt verschriebenen Sauerstoffflussraten.

Dosierung

Die Dosierung wird von Ihrem Lungenfacharzt vorgegeben und muss beachtet werden.

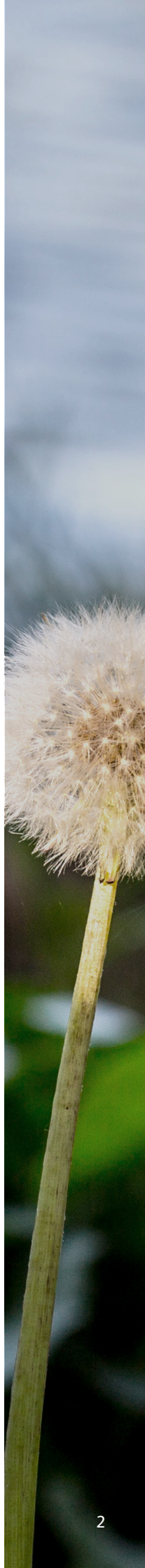

Flüssigsauerstofftherapie VIVILOX

Überblick

Flüssigsauerstoffsysteme bieten die größtmögliche Autonomie bei einer Langzeitsauerstofftherapie und erlauben dem Patienten, sich aufgrund der leichten und kompakten mobilen Einheit auch außerhalb der Wohnung aufzuhalten.

VIVISOL Paket VIVILOX

Stationärer Behälter (Liberator)

Abgabe von gasförmigem Sauerstoff, um dem Patienten die direkte, stationäre Sauerstoffinhalation zu ermöglichen.

Mobiles Flüssigsauerstoffgerät

Die mobile Einheit, die über einen praktischen und sicheren Anschluss gefüllt wird, gibt den gasförmigen Sauerstoff entsprechend der verordneten Floweinstellung ab.

Die mobile Einheit kann direkt vom Patienten nach Bedarf befüllt werden.

Der Patient hat so die Möglichkeit, auch mit Sauerstoff, seine Wohnung für die täglichen Erledigungen zu verlassen.

Die Krankenkassen übernehmen bei einer vorliegenden Verordnung und Kostenübernahmeerklärung die Kosten für ein komplettes VIVISOL Paket VIVILOX.

Vorteile

Vorteile von Flüssigsauerstoffsystemen

- Mobilität des Patienten wird gewährleistet
- Verbesserte Lebensqualität des Patienten
- Kein Stromverbrauch
- Wartungsarmes System
- Kein Backup System nötig
- Sie atmen 100 % medizinischen Sauerstoff

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Flüssigsauerstoff

Bitte beachten Sie im Umgang mit Flüssigsauerstoff immer die entsprechenden Sicherheitsvorschriften. Die Einhaltung dieser ist wichtig, da es sich bei Sauerstoff um ein verbrennungsförderndes Gas handelt.

Bitte beachten Sie außerdem, dass medizinischer Sauerstoff ein Arzneimittel ist und deshalb nur nach Verordnung Ihres Arztes angewendet und dosiert werden darf. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte immer Ihren verordnenden Arzt.

VIVISOL Paket VIVILOX

im Standardfall bestehend aus:

Stationärer Behälter
(Liberator)
auf einem
Rollfahrgestell
Kondenswasserbehälter
Nasenkanüle
(inkl. Verlängerungsschlauch
und Drehverbinder)
Befeuchterbecher
Mobiles Sauerstoffgerät
(inkl. Tragegurt)
Caddy
(auf Wunsch des Patienten)

Stationärer Behälter Liberator

Die Sauerstofflieferung an die Patienten wird durch den Einsatz spezieller kryogener Behälter durchgeführt.

Dem Patienten wird bei Verordnung ein stationärer Behälter (Liberator), ein tragbarer Behälter und das notwendige Zubehör zur Verfügung gestellt.

Stationärer Behälter (Liberator)


Stationäre Behälter werden somit als Lagerbehälter beim Patienten aufgestellt. Durch einen Untersatz auf Rollen kann der Behälter in der Wohnung bewegt werden. Die Behältergröße (Füllvolumen) hängt vom Verbrauch des Patienten ab und wird in Absprache mit dem VIVISOL Sauerstoffzustelldienst angepasst.

Lieferungen an Patienten

Leere Behälter werden vom Lieferanten in einem regelmäßigen Rhythmus gegen volle Behälter ausgetauscht.

Mobiles Flüssigsauerstoffgerät

Der tragbare Behälter kann über den stationären Behälter direkt vom Patienten aufgefüllt werden.

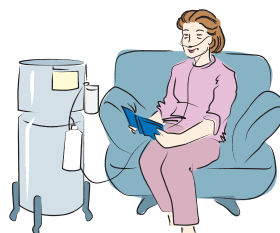

Verbrauchstabelle Liberator *

Versorgungsdauer in Abhängigkeit der eingestellten Zufuhrmenge - bei normaler Verwendung in **Tagen**.

Sauerstoffzufuhr in l/min.	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	15,0
Liberator 20 Liter	13.0	6.5	4.3	3.3	2.6	2.2	1.6	1.3	0.9
Liberator 30 Liter	18.8	9.4	6.3	4.7	3.8	3.1	2.4	1.9	1.3
Liberator 37 Liter	23.1	11.6	7.7	5.8	4.6	3.9	2.9	2.3	1.5
Liberator 45 Liter	28.1	14.1	9.4	7.0	5.6	4.7	3.5	2.8	1.9
Liberator 60 Liter	36.2	18.1	12.1	9.1	7.2	6.0	4.5	3.6	2.4

*Quelle: „Liquid Oxygen Use Time Chart“ Ref ML121022 Rev A, Caire Medical

Sprint/Stroller



Das leichte, tragbare Flüssigsauerstoffsystem von CAIRE Inc. bietet Patienten mit mobiler Sauerstofftherapie eine patientenfreundliche und unkomplizierte Sauerstoffversorgung, die sich einfach den Körperkonturen anpasst.

Die Patienten können an der LED-Anzeige einfach und schnell den Füllstand ablesen. Der tragbare Behälter für den mobilen Einsatz kann direkt über die stationäre Einheit (Liberator) befüllt werden. Der Gurt kann für die Reinigung entfernt werden.

Optional kann der Patient einen speziellen Rucksack zum Transport des Strollers erwerben.

- Seiten- oder Obenbefüllung möglich
- Gesteigerte Mobilität

High Flow Stroller



Der High Flow Stroller von CAIRE Inc., der für den Sauerstofftransport in Bewegung entwickelt wurde, gehört zu den modernsten Geräten in der Kryotechnik.

Mit seiner leistungsfähigen und einfachen Handhabung steht der High Flow Stroller für eine praktische und geldsparende Lösung in der mobilen Sauerstofftherapie.

Dieses Gerät ist hervorragend für Kliniken und Patienten geeignet, die eine Sauerstoffversorgung mit einer hohen Durchflussrate benötigen.

- Sauerstoffzufuhr bis max. 15 l/min.
- Gesteigerte Mobilität

Produktmerkmale

	Sprint	Stroller	High Flow Stroller
LOX Kapazität	0,68 kg	1,36 kg	1,36 kg
Sauerstoffzufuhr	bis max. 6 l/min.	bis max. 6 l/min.	bis max. 15 l/min.
Leergewicht	2,04 kg	2,27 kg	2,49 kg
Gewicht gefüllt	2,72kg	3,63 kg	3,86 kg
Höhe	298 mm	343 mm	343 mm
Gasförmiges Füllvermögen	1.026 l	1.026 l	1.025 l
Eigenverdampfungsrate	0,57 kg/Tag = 57 Std.	0,57 kg/Tag = 57 Std.	0,57 kg/Tag = 57 Std.
Betriebsdruck	20,0 psi (1,37 bar)	20,0 psi (1,37 bar)	19,8 psi (1,37 bar)
Durchschnittliche Nutzungsdauer	bei 2 l/min: 4,3 Stunden	bei 2 l/min: 8 Stunden	bei 2 l/min: 8 Stunden
Durchflussraten	Aus, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6	Aus, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6	Aus, 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15

Verbrauchstabelle *

Hersteller CAIRE Inc.

Sauerstoffzufuhr in l/min.	0.50	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	15.00
Sprint	12.2	7.5	4.3	3.1	2.4	2.0	1.7	-	-	-
Stroller	23.0	14.1	8.0	5.6	4.4	3.6	3.0	-	-	-
High Flow Stroller	23.0	14.1	8.0	5.6	4.4	-	3.0	2.3	1.9	1.4

Die Nutzungsdauer wird in Stunden dargestellt.

Sprint SF · 0,6 Liter · Art.Nr. 5409
 Sprint TF · 0,6 Liter · Art.Nr. 5410
 Stroller SF · 1,2 Liter · Art.Nr. 0062
 Stroller TF · 1,2 Liter · Art.Nr. 0968
 HF Stroller SF · 1,2 Liter · Art.Nr. 3747
 HF Stroller TF · 1,2 Liter · Art.Nr. 3947
 Spirit SF (Seitenbefüllung) · 300 · Art.Nr. 0065
 Spirit TF (Obenbefüllung) · 300 · Art.Nr. 0969
 Spirit SF (Seitenbefüllung) · 1200 · Art.Nr. 0364
 Spirit TF (Obenbefüllung) · 1200 · Art.Nr. 0970
 Helios Plus 300 · Art.Nr. 0833
 Helios Marathon 850 · Art.Nr. 0550

Spirit 300/1200



Die tragbaren Spirit Flüssigsauerstoffgeräte verbessern den Patientenkomfort, die Anwen-
derfreundlichkeit und die Mobilität. Dieses
Sparsystem gibt Sauerstoff nur während der
Einatemphase ab (getriggert) und ermöglicht
dadurch eine längere Nutzungsdauer als der
Stroller. Das Gewicht der Spirit Systeme ist gering
und beträgt bei befülltem Zustand ca. 1,95 kg
(Spirit 300), oder ca. 3,63 kg (Spirit 1200).
Die Spirit-Modelle sind als Side- oder Topfill-Aus-
führung erhältlich und leicht zubefüllen. Das
Füllverfahren, welches aus einem einzigen Ar-
beitsschritt besteht, ist in weniger als 3 Minuten
abgeschlossen.

- Klein und handlich
- Leichte Tragbarkeit
- Inspirationserkennung erfolgt elektrisch

Helios 300/850



Obwohl der Helios Plus 300 relativ klein ist, handelt
es sich um ein sehr leistungsstarkes Gerät, mit
einem Füllgewicht von gerade einmal 1,63 kg.
Mit der tragbaren Helios Marathon Sauerstoff-
einheit von CAIRE Inc. erlangen Patienten in
Sauerstofftherapie ungeahnte Freiheiten. Die
Nutzungsdauer beträgt bis zu 22 Stunden und
er wiegt in gefülltem Zustand nur 2,54 kg.
Mit der tragbaren Helios Marathon Einheit können
Patienten mitunter den ganzen Tag unterwegs
sein. Bei den tragbaren Helios Einheiten kann
zwischen unterschiedlichen Einstellungen für
den konstanten Sauerstofffluss und den Sauer-
stofffluss nach Bedarf gewählt werden.

- Pneumatische Inspirationserkennung
mit doppelumiger Nasenkanüle
- Effiziente, sehr geringe Verdampfungsrate

Produktmerkmale

	Spirit 300	Spirit 1200	Helios Plus 300	Helios Marathon 850
LOX Kapazität	0,36 kg	1,36 kg	0,41 kg	0,91 kg
Leergewicht	1,60 kg	2,27 kg	1,22 kg	1,63 kg
Gewicht gefüllt	1,95 kg	3,63 kg	1,63 kg	2,54 kg
Höhe	223 mm	335 mm	267 mm (mit Griff)	267 mm (mit Griff)
Gasförmiges Füllvermögen	275 l	1.026 l	308 l	685 l
Eigenverdampfungsrate	0,57 kg/Tag = 16 Std.	0,57 kg/Tag = 60 Std.	0,45 kg/Tag = 21 Std.	0,39 kg/Tag = 56 Std.
Betriebsdruck	20,0 psi (1,37 bar)	20,0 psi (1,37 bar)	22,0 psi (1,52 bar)	22,0 psi (1,52 bar)
Durchschnittliche Nutzungsdauer	bei Stufe 8 Std. (bei 16 Atemzügen pro Minute und einer bedarfsorientierten Zufuhr)	bei Stufe 30,4 Std.	bei Stufe 9,2 Std. (bei einer Sauerstoffversorgung nach Bedarf)	bei Stufe 2: 22 Std.
Sauerstoffzufuhr	Stufen 1-5	Stufen 1-5	Stufen 1-4	Stufen 1-6
Durchflussraten	Konstant CF 2 l/min nach Bedarf: aus, 1,1,5, 2, 3, 4, 5	Konstant CF 2 l/min nach Bedarf: aus, 1,1,5, 2, 3, 4, 5	Konstant: aus, 0,12, 0,25, 0,5, 0,75 nach Bedarf: aus, 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4	Konstant: aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach Bedarf: aus, 1,5, 2, 2,5, 3, 4

Verbrauchstabelle *

Sauerstoffzufuhr in Stufen	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	6,00
Spirit 300	-	15,1	10,7	2,4/8,0	-	5,4	-	4,0	3,2	-
Spirit 1200	-	57,4	40,5	9,2/30,4	-	20,3	-	15,2	12,2	-
Helios Plus 300	12,0	18,4	12,2	9,2	7,3	6,1	5,2	4,6	-	-
Helios Marathon 850	-	12,1	29,3	6,1/22,0	17,6	4,0/14,6	-	3,0/11,0	2,4	2,0

Die Nutzungsdauer wird in Stunden dargestellt.

Die Nutzungsdauer der Dosiersysteme basieren auf 20 bpm (Atemzüge pro Minute) und sind kursiv dargestellt.

Diagnostik - Pulsoximeter



Wrist Ox
Art. 5018 nVision® Software
Art. 5017 WristOx2® 3150 Pulsoximeter

Das Nonin WristOx2® 3150 ist ein kleiner, kompakter Pulsoximeter, das man als Armbanduhr trägt. Auf dem Bildschirm lassen sich die Sauerstoffsättigung und die Herzfrequenz ablesen. Optional können mit der Software nVision weitere Anwendungen, wie z.B. ein 6 Minuten Geh-test oder eine nächtliche Pulsoximetrie durchgeführt werden.



HBO Smart Pulsoximeter
Art.Nr. 6326

HBO Smart Pulsoximeter
für Kinder und Erwachsene

HBO-Smart ist das neueste Fingerspitzen-Pulsoximeter von Drive DeVilbiss International und für den Einsatz in Haushalten oder Krankenhäusern bestimmt. Es ermöglicht die nicht invasive Messung von Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz und Perfusionsindex. HBO-Smart gewährt neben der Auswahl von vier optionalen Bildschirmen die zusätzliche Einstellung von Benutzeralarmen. Somit bietet dieses neue, stylische Gerät alles, was Sie von einem modernen Pulsoximeter zur täglichen Spot-Check Messung erwarten können. Durch das mitgelieferte Zubehör ist HBO-Smart sofort einsatzbereit.

Produktmerkmale

Wrist Ox		HBO Smart Pulsoximeter
Betriebsdauer	mit Bluetooth 24 Stunden ohne Bluetooth 48 Stunden	25 Stunden
SpO2 Messbereich	0 - 100 %	70 - 99 %
Puls Messbereich	18 - 321 bpm	30 - 240 bpm
Abmessungen (LxBxH)	ohne Sensor 56 x 74 x 20 mm	65 x 35 x 30 mm
Gewicht	71 g inklusive Batterien und Armband	Gesamtgewicht 6g
Interne Stromversorgung	2 x AAA Batterien	2 x AAA Batterie
Anzeigen	SpO2, Plethysmogramm, Pulsfrequenz, Pulsanzeige, Batteriestatus	SpO2, Pulsfrequenz und Pulsfrequenzbalken, Plethysmographische Kurvenform, Perfusionsindex (PI) und Batteriestatus

Sauerstoffkonzentratoren VIVIKONZ

Überblick

Sauerstoffkonzentratoren werden für Langzeittherapien bei Patienten verwendet, denen es nicht möglich ist, einer außerhäuslichen Aktivität nachzugehen.

VIVISOL Paket VIVIKONZ

Konzentrator (Stand- oder mobile Einheit)

Der Konzentrator filtert Raumluft, indem er mittels mehrerer Molekularsiebe den in der Luft enthaltenen Stickstoff zurück hält und hochkonzentrierten Sauerstoff abgibt. Dieses Verfahren benötigt elektrische Energie, dafür muss ein Konzentrator allerdings nie „nachgefüllt“ werden.

Die Krankenkassen übernehmen bei einer vorliegenden Verordnung und Kostenübernahmeerklärung die Kosten für ein komplettes VIVISOL Paket VIVIKONZ.

Vor- und Nachteile

Vorteile von Konzentratoren

- Kontinuierliche Sauerstoffversorgung bis ca. 5 l/min. (bei minimalem Instandhaltungs- und Wartungsaufwand).
- Patient kann sich mithilfe von Sauerstoffkanülen unterschiedlicher Länge relativ frei zu Hause bewegen, ohne das Gerät verschieben zu müssen.
- Bei der Nutzung von mobilen Konzentratoren (z.B. Eclipse 5®, Inogen One® G5) ist eine hohe Mobilität und längere Autonomie gegeben.
- Der Patient ist an keinen Sauerstofflieferanten gebunden und hat unabhängig davon eine passende Sauerstoffversorgung.

Nachteile von Konzentratoren

- Stromkosten
- Betriebsgeräusche
- Die Sauerstoffreinheit beträgt je nach Modell und Flowrate 93 % +/- 3 %

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Konzentratoren

Bitte beachten Sie im Umgang mit Konzentratoren immer die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.

Bitte beachten Sie außerdem, dass die Nutzung des Konzentrators nur nach Verordnung Ihres Arztes angewendet und dosiert werden darf. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte immer Ihren verordnenden Arzt.

VIVISOL Paket VIVKONZ

bestehend aus:

Standkonzentrator

(z.B. VisionAire5 / Compact AKS525)

+ Befeuchterbecher

+ Nasenkanüle

oder

Mobile Einheit

(z.B. Eclipse 5 / Inogen One G5)

+ Nasenkanüle

VisionAire™ 5



Stationärer Sauerstoffkonzentrator, durch Änderungen im Produktdesign konnte die Zuverlässigkeit der Ventile und Siebaufnahmen drastisch verbessert werden. Bezüglich der Langlebigkeit und der geringen Ausfallquote setzt der Vision Aire™ neue Maßstäbe für Sauerstoffkonzentratoren mit Durchflussmengen von 5 l/min.

Features

- Hohe Sauerstoffkonzentration in allen Floweinstellungen
- Stufenlos einstellbar von 0,5 bis 5 l/min
- Kompakter Korpus, geringes Gewicht
- Gleichmäßig ruhiger Betrieb
- Geringer Stromverbrauch von 290 W unabhängig von der Durchflussmenge
- Sauerstoff-Verlängerung bis zu 9,7m Gesamtlänge möglich

Optional erhältliches Zubehör

- Abnehmbarer, wiederverwendbarer Befeuchterbecher

Produktmerkmale

	VisionAire™ 5	Compact 525 AKS
Größe (B x H x T)	35,8 x 52,8 x 29,2 cm	34,2 x 62,2 x 30,4 cm
Gewicht	13,6 kg	16,3 kg
*Schalldruckpegel	45 dBA	40 dBA
Art der Sauerstoffzufuhr	CF	CF
Reinheit des Sauerstoffs		93 % +/- 3 %
Flowrate (constant flow)	0,5 - 5,0 l/min (stufenlos)	0,5 - 5,0 l/min (stufenlos)

Hersteller Chart Industries
VisionAire™ 5 · **Art.Nr. 5862**

Compact 525 AKS



Der Sauerstoffkonzentrator Compact 525 mit integriertem Sauerstoffsensor (OSD), ist ein speziell für die Langzeitsauerstofftherapie (LTOT) konzipiertes Gerät und kann nach kurzer Einweisung vom Patienten selbstständig bedient werden.

Features

- Hohe Sauerstoffkonzentration in allen Floweinstellungen
- Stufenlos einstellbar von 0,5 bis 5,0 l/min
- Wartungs- und verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor
- Integrierter Transportgriff und 4 volllenkbare Laufrollen
- Intelligente turn-down Technologie reduziert den Stromverbrauch um ca. 20 % (bei Sauerstoffabgabe <2,5 l/min)
- Alarmfunktionen: optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung
- Sauerstoff-Verlängerung bis zu 15m Gesamtlänge möglich

- Abnehmbarer, wiederverwendbarer Befeuchterbecher
- Pädiatrisches Flowmeter

Hersteller DeVilbiss Healthcare
Compact 525 AKS · **Art.Nr. 3122**

*Schalldruckpegel: ISO 17510 1:2009

Mobiler Konzentrator

Eclipse® 5



Eine erhöhte Leistungsfähigkeit, der revolutionäre klinische Nutzen und innovatives Zubehör machen den Eclipse 5® zu einem System der nächsten Generation.

Beim Eclipse 5® handelt es sich um eine einfache Lösung, die dem Patienten zugute kommt.

Features

- Kontinuierlicher Flow 0,5 - 3,0 l/min
- Pulsflow von 16 - 192 ml
- Batterieleistung bis 5,1 Std.
- Batterieaufladezeit bis zu 8 Std.
- Kfz Ladegerät
- Akustische Alarme
- Einfache Bedienung für den Patienten
- Unterschiedliche Dosiermöglichkeiten
- Mobilität ist gewährleistet
- Einfacher Service / unkomplizierte Wartung

Optional erhältliches Zubehör

- Zusatzakku
- Gürtel für Befeuchterbecher (nur bei Standbetrieb)

Produktmerkmale

Eclipse 5

Größe (B x H x T) 31,2 x 49,0 x 18,0 cm
Gewicht 8,3 kg

*Schalldruckpegel 40 dBA (bei pulse dose 3), 48 dBA (bei CF 3)
Art der Sauerstoffzufuhr CF, Puls
Reinheit des Sauerstoffs 90,0 % +/- 3 %

Pulsgrößen (pulse flow) 0,5 - 3,0 l/min (in 0,5er Schritten)
16 - 96 ml (in 16er Schritten)
128 ml, 160 ml, 192 ml

Akkudauer (in Abhängigkeit der Flowrate / Anbauge in Stunden) 4,4 bei CF 0,5 / 3,7 bei CF 1 / 2,0 bei CF 2,0 / 1,3 bei CF 3
5,4 bei Puls 16 ml / 5,1 bei Puls 32 ml / 4,9 bei Puls 48 ml
4,0 bei Puls 64 ml / 3,7 bei Puls 80 ml / 3,5 bei Puls 96 ml
2,5 bei Puls 128 ml / 2,0 bei Puls 160 ml / 1,7 bei Puls 192 ml

Hersteller CAIRE Inc.
Eclipse 5® · Art.Nr. 4597

Mobiler Konzentrator

Inogen One® G5



Der Inogen One G5 bietet den meisten Sauerstoff je Kilogramm für einen tragbaren Sauerstoffkonzentrator auf dem heutigen Markt. Mit Flusseinstellungen von 1-6 wurde der Inogen One G5 entwickelt, um die Unabhängigkeit der meisten Nutzer von Sauerstoffgeräten rund um die Uhr zu erhöhen. Er kann zuhause oder unterwegs aufgeladen werden – wodurch Patienten die Freiheit der Sauerstoffversorgung genießen können. Jederzeit. Überall.

- Akkulaufzeit bis zu 13 Std.
- einfache Bedienbarkeit
- Betriebstemperatur: 5°C bis 40°C
- Inogen One® G5 Set inkludiert Konzentrator, AC Netzteil, Tragetasche und Doppelbatterie
- Batterieaufladezeit bis zu 6 Std.
- Kfz Ladegerät
- Backupfrequenz wenn kein Atemzug erkannt wird
- FAA getestet (Flugtransporttauglich)

- Rucksack
- Einfachbatterie (8 Zellen)
- Trolley

Inogen One G5

18,2 x 8,3 x 22,9 cm (mit Doppelbatterie)
2,6 kg mit Doppelbatterie; 2,15 kg mit Einfachbatterie

38 dBA (bei Einstellung 2)
Puls-dosierte Zufuhr
90 % - 3 % / +6 %

1-6 Stufen

Bis zu 6,5 Std. mit Einfachbatterie
Bis zu 13 Std. mit Doppelbatterie
(Doppelbatterie, 16 Zellen - ist bei Auslieferung inkludiert)

Hersteller Inogen
Inogen One® G5 · Art.Nr. 6367

Unser Webshop

shop.vivisol.at/

Mehr als nur ein Webshop

- ✓ 24-Stunden Bestellservice
- ✓ umfangreiche Auswahl
- ✓ laufend neue Produkte
- ✓ individuelle telefonische Beratung
- ✓ entspannte Lieferung nach Hause
- ✓ bequeme Selbstabholung in unseren Atemzentren österreichweit
- ✓ geprüfte Produktqualität



Gemeinsam für eine bessere Lebensqualität

In unserem Onlineshop finden Sie passende Produkte für Ihre Sauerstofftherapie

We care

shop.vivisol.at/



Folgende Artikel können dem Patienten nur **mit Verordnung** des Lungenfacharztes zur Verfügung gestellt werden:




Oxymizer Sauerstoffmaske

Art.Nr. 0946

Einzigartiges Reservoir, welches den reinen Sauerstoff speichert. Dadurch erhöht sich die Konzentration des eingeatmeten Sauerstoffs.

- komfortable Alternative zur Sauerstoffmaske
- Sauerstoffersparnis im Verhältnis 1:4
- verwendbar mit einem Dauerflow bis zu 15l/min

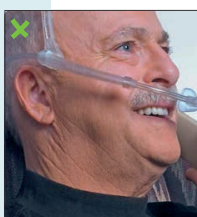

Oxy Arm

Art.Nr. 0752

Oxy Arm™ Nasenkanülen zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit aus. Diese Nasenkanülen sind die einzige Sauerstofftherapieform ohne direkten Gesichtskontakt. Ein freies, uneingeschränktes Sprechen ist dadurch möglich. Das Rückatmen von CO₂ wird vermieden. Wahlweise ist eine Mund- oder Nasenatmung möglich. Das leichte, moderne Design bringt mehr Freiheit und Komfort für den Patienten.

Nicht bei getriggerten Systemen verwendbar.



Oxy Nasor

Art.Nr. 0086

Oxy Nasor™ Kombisonde stellt eine wesentliche Erleichterung für den Sauerstoffpatienten dar. Die Besonderheit liegt in den Sauerstoffauslasspunkten, die in der Kreuzung zwischen Mund und Nasenströmung liegen, womit jeglicher Schleimhautkontakt vermieden wird. Bei jeder Einatmung wird quasi eine Sauerstoffwolke inhaliert, egal ob dies durch Mund oder Nase geschieht. Der Oxy Nasor™ eignet sich für all jene Sauerstoffsysteme mit kontinuierlicher Sauerstoffabgabe bis 3 l/min.

Nicht bei getriggerten Systemen verwendbar.



Sauerstoff Nichtrückatemmaske

Art. Nr. 6156

Die Nichtrückatemmaske mit Safety Vent ermöglicht durch das halboffene System die Applikation hoher O₂-Raten mit zusätzlicher Mitführung von Raumluft und ist dadurch für eine hohe Konzentration geeignet. Die Maske kann für Flowraten von 5 – 10 LPM verwendet werden.

Sie besteht aus einem durchsichtigem, weichen Vinyl, ist latexfrei und clean verpackt.

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Rucksack für Flüssigsauerstoffgeräte

Art. Nr. 6579



Der Rucksack für mobile Flüssigsauerstoffgeräte ermöglicht ein sicheres und bequemes Transportieren eines Stroller oder Spirit am Rücken des Patienten. Alternativ kann der Rucksack auch als Umhängetasche genutzt werden. Die nicht benötigten Träger können abgenommen bzw. sicher verstaut werden. Das Netzteil ermöglicht eine optimale Belüftung Ihres mobilen Flüssigsauerstoffgeräts. Geeignet für Stroller, Sprint, Spirit 600/1200 und HiFlow Stroller.

Trolley für Inogen One G3/G5

Art. Nr. 6398



Dieser praktische Trolley für Ihren Inogen One G3 oder Inogen One G5 erleichtert Ihnen den Transport Ihres Sauerstoffkonzentrators.

Caddy

Art. Nr. 0340



Fahrbarer Wagen zum bequemen Transport von mobilen Geräten wie Stroller und Spirit für unterwegs.

Schlauchverbinder

Art. Nr. 0079



Drehbarer Schlauchverbinder zum Verbinden der Nasenkanüle mit dem Verlängerungsschlauch.

Ohrenschoner

Art. Nr. 0085



Zum Aufstecken auf die Nasenkanüle. Verhindert unangenehme Druckstellen hinter dem Ohr beim Tragen der Nasenkanüle.

Sterilwasser

500 ml, Art. Nr. 0644

375 ml, Art. Nr. 5962



Zum Befeuchten, Vernebeln und Klimatisieren im geschlossenen System. Schutz vor einer Infektion durch Keime im Befeuchtersystem. Lieferung inkludiert einen Adapter zur Verbindung mit der Sauerstoffquelle.

Es wird empfohlen, das Sterilwasser im Behälter max. 7 Tage zu verwenden.

Befeuchterbecher



Zum Befeuchten des Sauerstoffs am Standgerät. Für einen Verbrauch von bis zu 6 oder 15 l/min. Reinigung mit milder Spüllösung empfohlen. Befeuchterbecher bis 15 l/min. (HighFlow), Art. Nr. 0440 Befeuchterbecher bis 6 l/min., Art. Nr. 0439

Es wird empfohlen, den Befeuchterbecher max. 6 Monate zu verwenden. Befüllung mit Sterilwasser. Bitte beachten Sie, dass der Befeuchterbecher immer so nahe wie möglich am Patienten platziert werden sollte.

Nasenkanüle

gerade, Art. Nr. 0088

gebogen, Art. Nr. 0067

Helios dual, gerade 2,1m, Art. Nr. 0713

Helios dual, gebogen, 2,1m, Art. Nr. 0712



Es wird empfohlen, die Nasenkanüle max. 14 Tage zu verwenden.

Schlauchverlängerungen

2,1m, Art. Nr. 0080

4,6m, Art. Nr. 0058

6,1m, Art. Nr. 0083

10m, Art. Nr. 6327



Zulässige maximale Schlauchverlängerung ist geräteabhängig.

Silikonnasenbrille

Art. Nr. 4667

Nasenbrille 2,1m aus 100 % Silikon. Frei von PVC Gerüchen. Hygienisch verpackt. Kein Hervorrufen von allergischen Reaktionen.



Sauerstoffmaske

Art. Nr. 0084

Für die Zufuhr von Sauerstoff über eine Maske. Für einen Verbrauch von bis zu 6 l/min.

Lieferung inkludiert einen 2,1m Anschlusschlauch.



Oxy Mask

Art. Nr. 4374

Oxy Mask ist eine Sauerstoffmaske mit Diffusortechnik. Das patentierte System ermöglicht ein FiO2 von 24-90 % (bei einer Flowrate von 1-15 l/min). Durch den gezielten Sauerstoffstrahl kann, im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, die Sauerstoffsättigung verbessert und der Gasverbrauch verringert werden.



Cegla „Nasengel“

Art. Nr. 5727

Das Nasengel zeichnet sich, dank seiner natürlichen Zusammensetzungen, durch eine besonders gute Verträglichkeit aus. Es ist deshalb für die tägliche Pflege der Nase zur Infektvorbeugung, begleitend zur Sauerstofftherapie und zur Behandlung chronischer Beschwerden geeignet, z.B. bei Hautreizungen am Naseneingang.



Oxy Kid

Art. Nr. 4928



Oxy Kid Maske erhöht durch das lustige und offene Design die Akzeptanz der Sauerstofftherapie bei Kindern.



We care

WITH YOU

SCHULUNG

der Ärzte und des Pflegepersonals

Organisation der
PATIENTENVERSORGUNGEN

Koordination der
**KRANKENHAUSENTLASSUNG
UND HEIMVERSORGUNG**

Hohes Maß an
QUALITÄT

Freundliche und kompetente
BERATUNG

KOSTENABRECHNUNG
mit der jeweiligen Krankenkasse

24 STUNDEN
Versorgungskonzept

We care

FOR YOU

kostenlose
SAUERSTOFFTANKSTELLEN
in Österreich

TRAVEL WITH DOC

VIVITRAVEL
URLAUBSVERSORGUNG

INTENSIVE SCHULUNG
in der Handhabung
der verordneten Hilfsmittel

**24H TECHNISCHES
NOTFALLTELEFON**
mit persönlicher Erreichbarkeit
österreichweit
0800 / 080 8335

JETZT NEU!



VIVISOL WEBSHOP

IN UNSEREM ONLINESHOP FINDEN
SIE PASSENDE PRODUKTE FÜR IHRE
SAUERSTOFFTHERAPIE

shop.vivisol.at/

Mehr Mobilität für Ihre Patienten

Reisen mit LTOT

Eines der Ziele der Sauerstofflangzeittherapie ist es, die Mobilität der Patienten zu garantieren. Mobil zu sein bedeutet auch reisen zu können und die Freizeit vollkommen entspannt außerhalb des üblichen Wohnsitzes zu verbringen.

Die zuständigen VIVISOL Zentren, an die Sie sich gewöhnlich wenden und die Zentren am Zielort, können Ihnen die bestmögliche Unterstützung gewähren.

Sie möchten verreisen?

Wenn Sie verreisen möchten, informieren Sie das VIVITRavel Reiseservice-Team bitte unbedingt schon 3 Wochen vor Reiseantritt (bei Reisen im Inland) und 4-6 Wochen vor Reiseantritt (bei Reisen ins Ausland).

Wir bieten Ihnen eine kostenlose* Flüssigsauerstoffversorgung in Österreich. Im Ausland übernehmen wir für bis zu 3 Wochen 50% der Kosten, sofern wir in Ihrem gewünschten Reise-land einen Partner für die Versorgung haben.

Bitte beachten Sie

- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die Möglichkeit, andere Orte und Länder zu bereisen.
- Setzen Sie sich mit Ihrem Reisebüro in Verbindung, um Ihre Reisen und Aufenthalte zu organisieren.
- Kontaktieren Sie rechtzeitig unser VIVITRavel Reiseservice-Team, um die Bereitstellung des Service an Ihren Zielorten zu organisieren.
- Teilen Sie dem VIVITRavel Reiseservice-Team alle Informationen mit, die notwendig sind, um ein schnelles und effizientes Service zu gewährleisten (z.B. Reisezeiten, Adressen, detaillierte Angaben zur Therapie usw.)

* sofern Sie an Ihrem Urlaubsort weder als Hauptwohnsitz noch Nebenwohnsitz gemeldet sind.

Reisevarianten

VIVISOL unterstützt Sie bestmöglich bei:

- **Auto**
Das Auto ist das gebräuchlichste Transportmittel. Um die eigene Sicherheit und die der anderen zu gewährleisten, bitten wir Sie jedoch unsere Richtlinien zu beachten. Diese finden Sie auf dem VIVISOL Formular *Einweisung zum Transport eines Flüssigsauerstoffgeräts im Privat-PKW*
- **Flug**
Die Verwendung von eigenen Sauerstoffsyste-men wird von vielen Fluggesellschaften, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nicht gestattet. Die Fluggesellschaft wird Sie mit dem notwendigen Sauerstoff während des Fluges versorgen oder evtl. die Genehmigung für den Gebrauch eines tragbaren Konzen-trators erteilen.
Bitte wenden Sie sich an Ihr Reisebüro, um Informationen über die Vorschriften der Beförderung von Sauerstoff im Flugzeug bei den jeweiligen Fluggesellschaften zu erhal-ten. Auch hier helfen wir natürlich gerne.
- **Schiff**
Aufgrund der kleinen Kabinen und der schlechten Belüftung dieser, ist es ratsam an Bord mobile Konzentratoren zu benutzen. Informieren Sie unbedingt vor Reiseantritt die Schifffahrtsgesellschaft, dass Sie ein Patient mit Sauerstofftherapie sind. Gerne unterstützen wir Sie hier.
- **Zug**
Das Reisen mit der Bahn ist eine der bequemsten und erholsamsten Arten, Urlaub mit Sauerstoff zu machen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser VIVITRavel Reiseservice-Team.

Gute Reise!

VIVITRavel REISESERVICE-TEAM

Tel: 01/524 62 83

Fax: 01/524 16 42

vivittravel@vivosol.at

Sauerstofftankstellen

Bitte beachten Sie die jeweiligen Öffnungszeiten - wir empfehlen zur eigenen Sicherheit vorher telefonisch anzufragen.
Änderungen vorbehalten, Stand August 2021, die aktuelle Liste finden Sie unter: www.vivisol.at

1010 Wien	Urania-Apotheke Stubenring 2	Tel. 01 512 44 63
1060 Wien	Apotheke „Am Naschmarkt“ Linke Wienzeile 20	Tel. 01 586 51 59
1070 Wien	Apotheke „Zum weißen Hirschen“ Westbahnstraße 32	Tel. 01 523 76 68
1070 Wien	Walfisch-Apotheke Lerchenfelder Straße 41	Tel. 01 523 81 79
1100 Wien	Apotheke am Reumannplatz Reumannplatz 16	Tel. 01 604 13 98
1100 Wien	Kur-Apotheke Oberlaa Kurbadstraße 14	Tel. 01 688 13 23
1110 Wien	Ludwigs-Apotheke Simmeringer Hauptstr.128	Tel. 01 767 51 34
1130 Wien	Westend-Apotheke Hietzinger Hauptstraße 64	Tel. 01 877 51 78
1140 Wien	Europa Apotheke Hütteldorfer Straße 186	Tel. 01 912 37 90
1140 Wien	Apotheke im Auhof Center Albert Schweitzer-Gasse 6	Tel. 01 577 14 44
1150 Wien	Lindwurm Apotheke Gablenzgasse 31	Tel. 01 982 24 21
1160 Wien	Apotheke am Schuhmeierplatz Schuhmeierplatz 14	Tel. 01 486 33 74
1170 Wien	Linden Apotheke Hernalser Hauptstraße 155	Tel. 01 486 24 04
1200 Wien	Allerheiligen-Apotheke Allerheiligenplatz 4	Tel. 01 330 43 23
1210 Wien	Apotheke 21 Kürschnergasse 1A	Tel. 01 890 32 28
1220 Wien	Apotheke Regenwald Wagramer Straße 81/134	Tel. 01 202 28 13
1230 Wien	Apotheke Rodaun Ketzergergasse 368	Tel. 01 888 41 70
2320 Schwechat	Landschafts-Apotheke Wiener Straße 5	Tel. 01 707 64 96
2700 Wr. Neustadt	Alte Kronen-Apotheke Hauptplatz 13	Tel. 02622 233 00
2700 Wr. Neustadt	Bahnhof-Apotheke Zehnergasse 4	Tel. 02622 232 93
3500 Krems	Univ. Klinikum Krems Mitterweg 10	Tel. 02732 900 40
7082 Donnerskirchen	Schutzengel-Apotheke Neusiedler Straße 16	Tel. 02683 854 2
7350 Oberpullendorf	Apotheke „Zum Mohren“ Schloßplatz 1	Tel. 02612 423 39
4020 Linz	Krankenhaus Elisabethinen Fadingerstraße 1	Tel. 0732 767 60
4020 Linz	City Apotheke Bahnhofplatz 3-6	Tel. 0732 600 150
4061 Pasching	Christophorus-Apotheke Plus-City, Plus-Kauf-Straße 7	Tel. 07229 610 85
4600 Wels	Schutzengel-Apotheke Eferdinger Straße 20	Tel. 07242 470 98
4840 Vöcklabruck	Apotheke Schöndorf Robert-Kunz-Straße 11	Tel. 07672 225 62
5020 Salzburg	Borromäus Apotheke Gaisbergstraße 20	Tel. 0662 643 655
5760 Saalfelden	Pinzgau-Apotheke Leoganger Straße 39	Tel. 06582 741 03
8010 Graz	Adler Apotheke Hauptplatz 4	Tel. 0316 830 342
8045 Graz-Andritz	Apotheke Andritz Weinzöttlstraße 3	Tel. 0316 672 808
8054 Seiersberg	Lilien-Apotheke Kärntner Straße 537	Tel. 0316 253 005
8160 Weiz	Paracelsus Apotheke Birkfelder Straße 1	Tel. 0317 236 50
9020 Klagenfurt	Apotheke vorm Lindwurm Neuer Platz 9	Tel. 0463 512 575
9500 Villach	Kreis-Apotheke „Zum goldenen Löwen“ Hauptplatz 9	Tel. 04242 241 18
6020 Innsbruck	St. Anna Apotheke Maria-Theresien-Str. 4	Tel. 0512 585 847
6460 Imst	Stadt Apotheke Dr.-Pfeiffenberger-Straße 22	Tel. 05412 662 10
6500 Landeck	Stadt Apotheke „Zur Mariahilf“ Malser Straße 18	Tel. 05442 623 34
9900 Lienz	Bezirkskrankenhaus Emanuel von Hübner-Straße 5	Tel. 04852 606
6850 Dornbirn	Apotheke im Messepark Messestraße 2	Tel. 05572 558 80
6700 Bludenz	Apotheke Bludenz Stadt Werdenberger Str. 24-26	Tel. 05552 620 47
6900 Bregenz	Stadt Apotheke Kirchstraße 7	Tel. 05574 421 02

Zuverlässig mit bester Versorgung

VIVISOL Service 365 Tage im Jahr

Bisweilen können Probleme in den ungelegenen Momenten auftreten. VIVISOL ist auch dann persönlich am Telefon und vor Ort kostenlos für den Patienten da.

VIVISOL ist immer darum bemüht den Patienten zu jeder Zeit bestmöglich zu versorgen. Durch den 24 Stunden Notdienst ist ein solches Service gewährleistet.

Durch regelmäßige Schulungen des Bereitschaftsteams stellen wir die hohe Qualität unseres Bereitschaftsservices sicher.

VIVISOL 24h technischer Notdienst Notrufnummer - 0800/080 8335 für Sauerstoffpatienten österreichweit

Halten Sie uns am Laufenden

Krankenhausaufenthalt, Urlaub, Kuraufenthalt, neue Kontaktdaten?

Bitte rufen Sie Ihren VIVISOL Sauerstoffzustell-dienst an und informieren Sie diesen, wenn Sie ins Krankenhaus gehen bzw. sobald Sie wissen, wann Sie voraussichtlich wieder nach Hause entlassen werden.

Bitte rufen Sie unser Kundenservice an, sollten Sie Zubehör bestellen möchten, wenn Sie längere Zeit abwesend sind (Kuraufenthalt, Zweitwohnsitz, Urlaub etc.), wenn Sie übersiedeln oder eine neue Telefonnummer bekommen.


VIVISOL Kundenservice 01/524 62 83 - 701

TRAVELwithDOC

„TRAVELwithDOC“ ist ein gemeinnütziger, nicht auf Gewinn orientierter Verein (Non-Profit-Organisation), ehrenamtlich organisiert für alle reiseinteressierten Menschen mit oder ohne

Handicap. VIVISOL unterstützt den Verein mit Sauerstoff.

Informieren Sie sich online unter:
<http://www.travelwithdoc.at/>

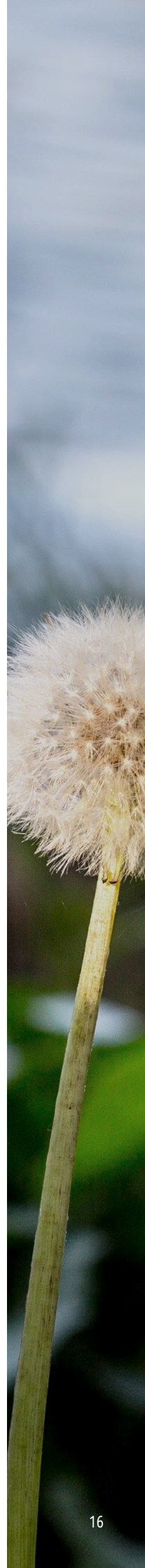

Sicherheitshinweise

Flüssigsauerstoffsysteme



Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung vor Gebrauch.



Nicht in sehr kleinen Räumen verwenden. Achten Sie besonders beim Abfüllen der mobilen Einheit auf eine gute Raumdurchlüftung.



Rauchen ist streng verboten!



Feuer und offenes Licht sind streng verboten!



Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Radiatoren und Heizungen.



Nicht in der Nähe von Steckdosen oder elektrischen Geräten lagern oder benutzen.



Benutzen Sie kein Öl, keine Cremes oder Lotionen, diese können sich leicht entzünden.



Decken Sie das Gerät niemals ab, dies würde zu einer Sauerstoffanreicherung führen.



Vorsicht bei Berührung der kalten Teile, es besteht die Gefahr einer Kälteverbrennung.



Lagern Sie das Gerät ausschließlich aufrecht.

Konzentratoren



Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung vor Gebrauch.



Nicht in sehr kleinen oder feuchten Räumen verwenden. (z.B. Bad)



Rauchen ist streng verboten!



Feuer und offenes Licht sind streng verboten!



Benutzen Sie kein Öl, keine Cremes oder Lotionen, diese können sich leicht entzünden.



Decken Sie das Gerät niemals ab!

Versandkosten**Patienten**

Ab einer Bestellsomme von € 45,00 inkl. Ust. liefern wir Ihnen frei Haus. Bei einer Bestellsomme unter € 45,00 inkl. Ust. erlauben wir uns, Ihnen eine Versandpauschale von € 3,60 inkl. Ust. in Rechnung zu stellen

Niedergelassene Ärzte / Krankenhäuser

Ab einer Bestellsomme von € 145,00 inkl. Ust. liefern wir Ihnen frei Haus. Bei einer Bestellsomme unter € 145,00 inkl. Ust. erlauben wir uns, Ihnen eine Versandpauschale ab € 3,60 inkl. Ust. in Rechnung zu stellen.

Bankverbindung

Bank Austria
IBAN: AT96 1200 0763 1356 6500
BIC: BKAUATWW

Firmenbuch / UID Nummer

VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH
FN 36126b - UID ATU15045804

VIVISOL Heimbehandlungsgeräte Ges.m.b.H.

Richard Strauss-Straße 10
1230 Wien · Austria
t +43 1 524 62 83
f +43 1 524 16 42
office@vivisol.at
www.vivisol.at

Öffnungszeiten

Mo-Do	08:00 - 17:00 Uhr
Freitag	08:00 - 15:00 Uhr

Bildquellen / Alle Rechte vorbehalten!

Images 2016 CAIRE Inc. All Rights Reserved / Images Invacare, used with permission, all rights reserved. / Inogen 2018. All rights reserved / Images 2012 Vivisol Srl., Via Borgazzi 27, 20052 Monza (MI) Italy, / Titelbild: Photo Schauer, all rights reserved to VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH. / div. Hersteller

AGB's

Druckfehler sowie künftige Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.vivisol.at und das jeweils aktuelle Angebotsmaterial.

Gender-Klausel

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in dieser Broschüre in der männlichen Form verwendet werden, gelten sinngemäß auch in der weiblichen Form. Lediglich aus Gründen der Vereinfachung wurde oft nur die männliche Form gewählt.

VIVISOL WEBSHOP
shop.vivisol.at/



VIVISOL
Heimbehandlungsgeräte GmbH

office@vivisol.at
www.vivisol.at

Zentrale Wien

Richard Strauss-Straße 10 · 1230 Wien
t +43 1 524 62 83
f +43 1 524 16 42



Weitere Informationen unter
www.vivisol.at

We care



**SAUERSTOFF
THERAPIE**